

シムビコート[®]タービューヘイラ[®] を使用される患者さんへ

使用する吸入薬	用法・用量	薬剤の取り替え
<input type="checkbox"/> 60吸入 <input type="checkbox"/> 30吸入	指示された「用法・用量」を守りましょう。 朝 吸入 ・ 夜 吸入	薬剤の取り替え日がきたら、新しい薬を使用しましょう。 年 月 日()



新しい吸入器を使用するとき限り、以下の操作を行ってから **①** の手順へ進んでください。

まっすぐに立てます。

マウスピース

クルッ

カチッ

赤いグリップを左右に回して「カチッ」と3回鳴らし**①**へ進む。

赤いグリップを回します。3回



① 右へ「クルッ」と回す
赤いグリップを右へ止まるまで回します。



② 左へ「カチッ」と戻す
赤いグリップを左へ「カチッ」と音がするまで戻すと薬剤が1吸入分セットされます。



③ 息を吐き、「スーッ」と深く吸い込む
「ハー」と大きく息を吐いた後、マウスピースをくわえ深く吸いあげてください。

⚠️ マウスピースに息をふきかけないでください。




“1回2吸入”など複数回吸入する場合は、**①** ~ **③** を繰り返してください。

最後に必ずうがいまたは口をすすぎます。

薬の残量・終了の目安

吸入器の小窓(カウンター)におおよその残りの吸入回数が表示されています。「クルッ」「カチッ」の操作に連動して少しずつカウンターが進みます。

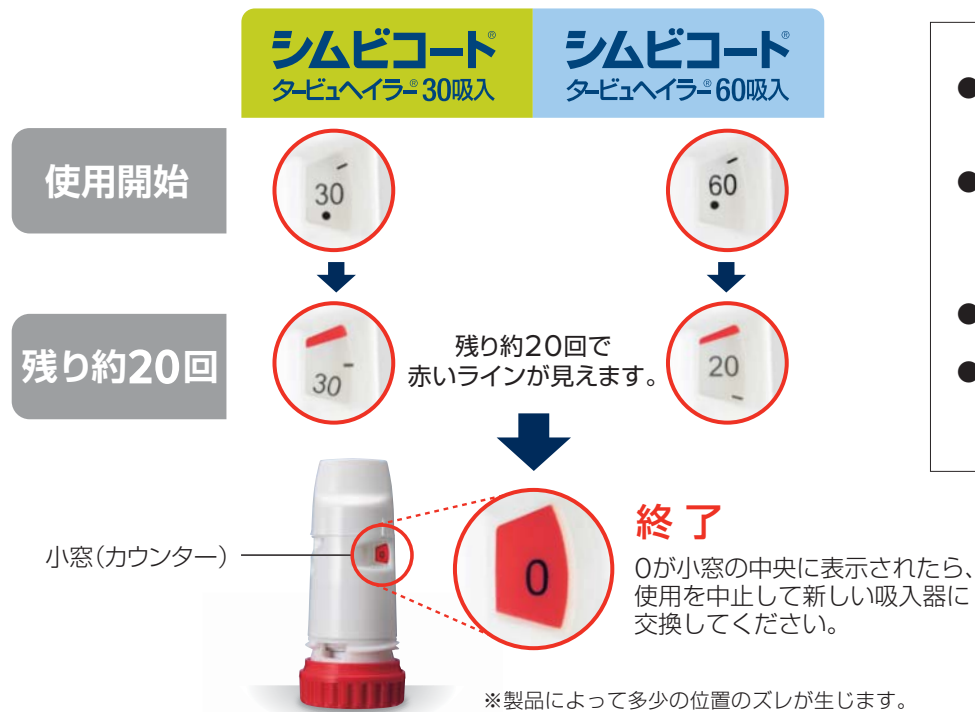

保管・手入れ・廃棄について

- 使用後は必ずキャップを閉めて、室温で保管してください。
- マウスピースが汚れた場合は乾燥した布などで拭いてください。水洗いしないでください。
- 吸入器を分解しないでください。
- 廃棄する際は、自治体の廃棄方法に従ってください。

Q&A シムビコートタービューヘイラーご使用にあたってよくある質問

Q 「クルッ」「カチッ」を2回繰り返せば2回分まとめて吸入できますか？

A 2回分まとめて吸入はできません。

赤いグリップを何回まわしても薬は1回分しかセットされません。2回吸入する場合は、「クルッ」「カチッ」「スーッ」の操作を2回行ってください。



Q 残量の表示は0ですが、「カサカサ」音がするからまだ残っていますか？

A 「カサカサ」音がするのは乾燥剤の音です。残量の表示が0になった薬は使えません。

小窓の中央に0が表示されたら、吸入終了です。回転グリップは回り続けますが、カウンターは動きません。容器を振ると「カサカサ」音がしますが、これは乾燥剤の音です。



Q 吸った感じがしないのですが、きちんと吸入できていますか？

A 「クルッ」「カチッ」「スーッ」の操作をきちんとしていれば、吸入できています。

1回の吸入量のごくわずかなので、刺激が少なく吸った感じはしないかもしれませんが、「クルッ」「カチッ」「スーッ」の操作をきちんとしていけば、薬は吸入できています。薬を吸入できているか不安なときは、マウスピースに色の濃いハンカチをかぶせて吸入してください。きちんと吸入できていればハンカチに1回分の薬剤が残ります。



お問い合わせ先

アストラゼネカ株式会社

受付時間 / 月～金 9:00～18:30 (土日・祝日除く)
メディカルインフォメーションセンター
☎ 0120-119-703

アステラス製薬株式会社

受付時間 / 月～金 9:00～17:30 (土日・祝日除く)
くすり相談センター
☎ 0120-865-093

(09年12月作成) MCP-TP
SYM22002A01
SYM402